



SCHEDA TECNICA

SILPOD MEDIUM **SILICONE DI CONDENSAZIONE**

Il **SILPOD MEDIUM** di **CONDENSAZIONE** è un elastomero siliconico in pasta che vulcanizza a temperatura ambiente mediante il suo catalizzatore (gel o gocce). L'alta qualità del silicone con la sua eccezionale plasticità e la sua media durezza permette di facilitare il processo di creazione di tutti i tipi di ortesi confortevoli e di lunga durata con ottime caratteristiche di flessibilità e resistenza.

CAMPO D'APPLICAZIONE

Il **SILPOD MEDIUM** di **CONDENSAZIONE** è idoneo alla realizzazione di ortesi, dispositivi protettivi o compensativi delle alterazioni strutturali del piede, specificatamente correttivo con un buon confort.

CARATTERISTICHE FISICHE E TECNICHE (a 23°C ± 2)

✓ PRIMA DELLA CATALISI:	Aspetto parte A	Pasta Beige
	Penetrazione (mm/10)	260
	Aspetto parte B Catalizzatore	Gel o Gocce
✓ IN FASE DI CATALISI :	Controllato al	Gel 3% Gocce 1%
	Pot life (min.)	1'30"
	Tempo di presa (min.)	< 5'00"
✓ DOPO CATALISI :	Durezza a 24 (Sh A)	17±2

I VALORI SONO INDICATIVI E NON SONO PERTANTO VALIDI PER LA PREPARAZIONE DI SPECIFICHE DI FORNITURA.

PROPORZIONI CATALIZZATORE

Il catalizzatore in gel deve essere utilizzato nella misura del 3%, mentre per il catalizzatore liquido si consiglia di aggiungere circa 9-12 gocce.

IMPORTANTE: le informazioni contenute nelle schede tecniche sono basate sullo stato attuale delle nostre conoscenze. Non potendo conoscere tutte le applicazioni per le quali sono utilizzati i nostri prodotti e le condizioni del loro impiego, non si assume alcuna responsabilità in merito alla loro conformità per un'utilizzazione o uno scopo particolare. Queste informazioni non devono in alcun caso sostituirsi alle prove preliminari che è indispensabile effettuare per assicurarsi dell'adeguatezza del prodotto a ogni caso determinato. E' compito dell'utilizzatore determinare, sotto la propria responsabilità, se i prodotti qui descritti si prestano in modo appropriato all'utilizzo al quale sono destinati. I consigli dati, relativi all'impiego dei nostri prodotti, non devono condurre, in alcun caso, alla violazione di brevetti di terzi.
Rev.0 del 01.05.2024

 **TECHIM GROUP** srl

Via Monte Grappa, 32 - 20020 Arese, Milano
T +39 (0)2 93581452 - F +39 (0)2 9385770
info@techimgroup.com - Piva 02219900152
www.techimgroup.com

TECHIM
PODIATRY